

Liberator Sidefill en Topfill 37 I

Westfalen Medical BV
Rigastraat 14
7418 EW Deventer
Tel. +31 (0) 570 - 858 450
Fax +31 (0) 570 - 858 451
www.westfalenmedical.com
info@westfalenmedical.nl

Flowinstelling:	Gebruiksduur
0,25	60 dagen
0,5	46 dagen
0,75	30 dagen
1,0	22 dagen
1,5	14 dagen
2,0	10 dagen
3,0	7 dagen
4,0	5 dagen
5,0	4 dagen
6,0	3 dagen
8,0	2 dagen
10,0	2 dagen
12,0	1 dag en 12 uur
15,0	1 dag

Overige specificaties

Hoogte	83,2 cm
Diameter	35,6 cm
Gewicht leeg	22,68 kg
Gewicht vol	64,4 kg

Let op! De tijden die bij de apparatuur staan, zijn gemiddelden. Houd daarom in de praktijk altijd iets korter aan. De werkelijke tijd is afhankelijk van het aantal ademhalingen van de patiënt en de leeftijd van de apparatuur.