













Zuurstofcilinder met geïntegreerd reduceertoestel Instructiekaart

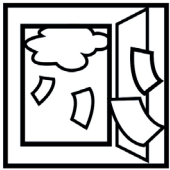
<p>1 Lees altijd de instructies.</p> 	<p>2 Geen open vuur. Niet roken. Ook geen esmoker/vape.</p>  	<p>3 Geen olie/vetten of vethoudende producten gebruiken.</p> 
<p>4 Ventileer de ruimte goed.</p> 	<p>5 Gebruik i.v.m. brandveiligheid geen elektrische apparaten die vonken kunnen opwekken in de ruimte waar de zuurstofcilinder staat.</p> 	<p>6 Zet de zuurstofcilinder altijd vast en rechtop.</p> 
<p>7 Maximale lengte verbindingsslang.</p> 	<p>8 Ervaart u geen flow? Controleer de flow door de neusbril en/of slang op uw handpalm of in een glas water te plaatsen. Bij geen bubbels de slang nalopen en de flowmeter controleren. Ervaart u nog steeds geen flow, neem dan contact op met Westfalen Medical.</p> 	<p>9 Storingen en/of vragen: Tel. 0570-858 450</p>  <p>Westfalen Medical</p> 

Ga voor de instructievideo's naar onze website: zuurstofinfo.nl/downloads/instructievideo-zuurstofcilinders






Geïntegreerd reduceertoestel Gebruiksaanwijzing

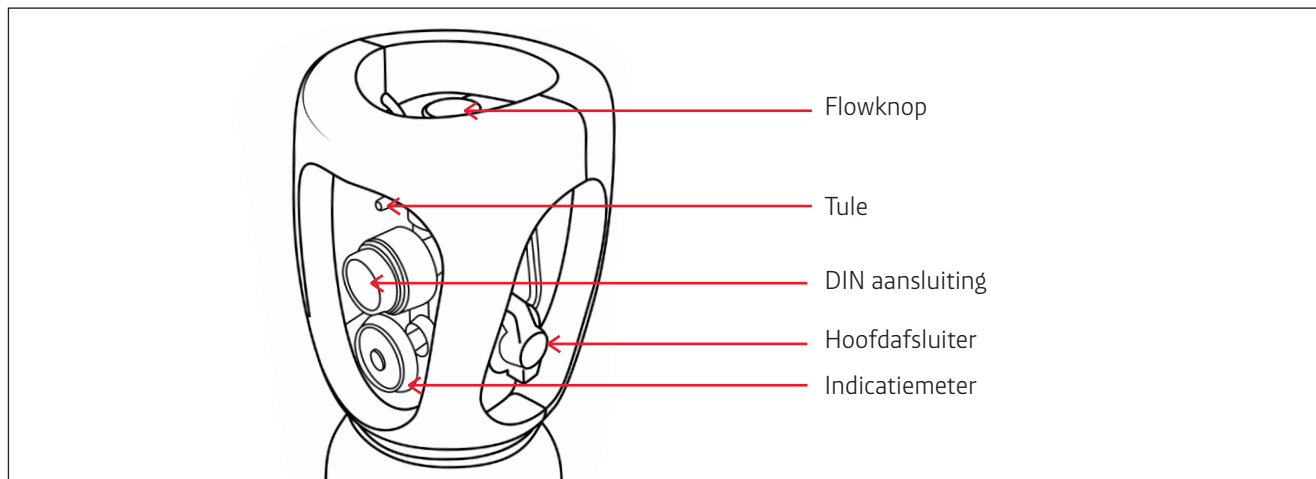


1

Draai de hoofdafsluiter open door in de richting van OPEN te draaien.
De indicatiemeter geeft nu aan hoeveel er nog in de cilinder zit.

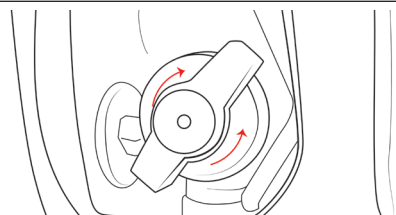


2

Draai de flowknop naar de voor u voorgeschreven flow.
Draai de knop door tot de flow recht boven de tule zit.
Zodra u de flow instelt, hoort u een sissend geluid.

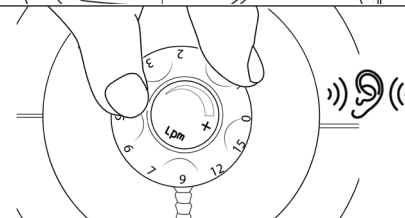


3

Plaats de lange slang¹ op de tule² van de cilinder.

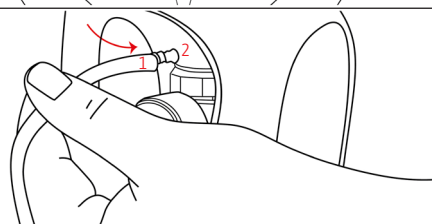

4

Als u klaar bent met het gebruik van de cilinder, draait u de
hoofdafsluiter dicht door in de richting van CLOSE te draaien.
Na het afsluiten sist de cilinder nog na.

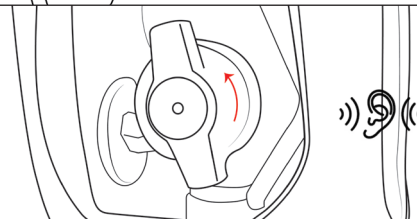

5

Zodra het sissen is gestopt, draait u de flowknop weer terug naar 0.

